

Voor het eerste gebruik

Inspecteer bij ontvangst of de set compleet en onbeschadigd is. Neem contact op met de leverancier wanneer er problemen zijn of wanneer de trainingsset niet aan uw verwachtingen voldoet. Gebruik de set niet wanneer er onderdelen beschadigd zijn. De dilatatieset is niet steriel. Voor het eerste gebruik dient u de silicone dilator met water en zachte zeep te wassen.

Een set bestaat uit:

REF	Bestaat uit:
17-IR013	8 piece dilator set silicone dilators sizes 1-8 etui, IFU
17-IR014	Small dilator set silicone dilators sizes 1-4 etui, IFU
17-IR015	Medium dilator set silicone dilators sizes 3-6 etui, IFU
17-IR016	Large dilator set silicone dilators sizes 5-8 etui, IFU
17-IR017-1	Silicone dilator size 1, IFU
17-IR017-2	Silicone dilator size 2, IFU
17-IR017-3	Silicone dilator size 3, IFU
17-IR017-4	Silicone dilator size 4, IFU
17-IR017-5	Silicone dilator size 5, IFU
17-IR017-6	Silicone dilator size 6, IFU
17-IR017-7	Silicone dilator size 7, IFU
17-IR017-8	Silicone dilator size 8, IFU
17-IR0023	Dilator handvat, steel met een erop te draaien schijf incl. 3 silicone bevestigingsringen

Materiaal en eigenschappen

De dilators en het handvat zijn gemaakt van voor medisch gebruik goedgekeurde silicone. Ze zijn flexibel, zacht en glad

Toepassing

Intimate Rose dilators worden meestal gebruikt in combinatietherapie bij vaginale klachten en problemen bij het vrijen. Doelen kunnen zijn: bevrijding van pijn, dilatatie van de vagina en penetratie mogelijk maken.



Let op:

Deze vaginale dilatatieset is uitsluitend bedoeld voor persoonsgebonden gebruik. Deel uw dilatatieset niet met andere personen.

De dilators dienen na gebruik gereinigd te worden met warm water en zeep. Spoel ze goed af en droog de onderdelen grondig voor u ze in het etui verpakt.

Contra-indicaties

In geval van de onderstaande aandoeningen de dilatatieset alleen gebruiken na consultatie en permissie van uw arts

- infecties in het bekkenbodemgebied,
- bloedingen zonder duidelijke oorzaak,
- onbekende pijn in de buik,
- tumoren in de bekkenbodem,
- gebruik tijdens zwangerschap.

N.B. Wanneer u onder behandeling bent van een professional: volg de instructies van uw behandelaar.

Algemene instructies voor gebruik.

1. Kies de dilator(s) waar u mee wilt oefenen
2. Was uw handen en de dilator met milde zeep en warm water voor gebruik. Spoel goed af met warm water. En droog af met een schone handdoek.
3. Kies een comfortabele uitgangspositie. Bijvoorbeeld op uw rug liggend met uw hoofd en schouders gesteund. Plaats uw benen gebogen en een beetje uit elkaar. Een andere mogelijkheid is staan met één voet op een verhoging. Breng in ruime mate glijmiddel aan op de dilator en rond de opening van uw vagina.
Bij deze silicone dilatoren dient u altijd een **glijmiddel op waterbasis** te gebruiken; glijmiddel op basis van silicone of olie tast het oppervlak van de silicone pelotte aan.
4. Adem rustig in en breng op de daarop volgende uitademing de dilator voorzichtig in.
5. Breng de dilator in zover als dat voor u comfortabel is. Het mag drukkend of rekkend voelen maar het mag niet pijnlijk zijn. Afhankelijk van uw aandoening beweegt u de dilator met rustige bewegingen op en neer, draai de dilator rustig rond of laat het hulpmiddel enkele minuten zitten.
6. Desgewenst herhaalt u de procedure met een grotere pelotte.

Frequentie en duur van de behandeling zijn afhankelijk van uw aandoening tussen de 5 en 20 minuten, dit kunt u het beste met uw behandelaar afstemmen.

Belangrijk:

- Deze informatie is niet bedoeld als vervanging voor uw medische behandeling of aan u gegeven medisch advies.

- Lichte bloedingen, spots of een onplezierig gevoel kunnen optreden als gevolg van het gebruik van de dilatatieset. Echter wanneer deze klachten aan blijven houden of erger worden, dient u met oefenen te stoppen en een behandelaar te consulteren.



Gebruik een glijmiddel op waterbasis. Glijmiddel op silicone basis of olie tast het oppervlak van de pelotte aan.



Na behandeling voor een infectie of een andere vaginale besmetting dient u de set te ontsmetten voor hergebruik.

De plastic verpakking niet direct weggooien,

De informatie op de verpakking kan nodig zijn in geval van klachten of beschadiging.

Afvoer einde levensduur: de vaginale dilatatieset bevat geen schadelijk stoffen en kan volgens de gemeentelijke regels voor restafval afgevoerd worden.



MDR 2017/745

Gegevens leverancier

Pelvitec BV
Rotterdamseweg 183-C
2629 HD Delft
Nederland
www.pelvitec.nl
info@pelvitec.nl

Tel : +31 (0)10 – 303 22 90
Fax: +31 (0)10 – 303 22 91

Gegevens fabrikant

Pelvision BV
Rotterdamseweg 183-C
2629 HD Delft
Nederland
www.pelvision.com
info@pelvision.com

Tel : +31 (0)10 – 303 22 92
Fax: +31 (0)10 – 303 22 93